



**Kurzsichtig?
Nachtlinse korrigieren im Schlaf**



**Mit Nachtlinsen ist kein operativer Eingriff notwendig und die Veränderung ist jederzeit reversibel.
Eine sichere und komfortable Lösung.**

Sie fragen sich bestimmt: Wie geht das?

Spezielle, für Ihre Augen maßangefertigte formstabile Kontaktlinsen, die Nachtlinsen see**free**[®], werden regelmäßig über Nacht im Schlaf getragen.

Eine sanfte, kontrollierte Formveränderung der Hornhaut bewirkt eine Korrektur der Fehlsichtigkeit, sodass über den gesamten Tag keinerlei Sehhilfe benötigt wird.

Dieses Verfahren ist unter dem Begriff Orthokeratologie oder Ortho-K bekannt.

Wir sind qualifiziert, die Nachtlinse see**free**[®] anzupassen. Für die Anpassung wird Ihre Hornhaut vermessen, um die passende Kontaktlinsengeometrie zu ermitteln. Die see**free**[®] ist somit ein Unikat – ausschließlich für Ihr Auge hergestellt.

**Schlafend die Freiheit des Sehens
wieder erlangen.**

Nachtlinsen - und Sie können den ganzen Tag ohne Brille und ohne Kontaktlinsen scharf sehen.

Für wen sind Nachtlinsen geeignet?

- ✓ Für jeden, der den ganzen Tag ohne Sehhilfe scharf sehen möchte
- ✓ Bei geringer bis mittlerer Myopie (Kurzsichtigkeit) bis maximal -4,5 dpt
- ✓ Bei geringem Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) bis maximal -2,5 dpt
- ✓ Für Sportler, bei denen eine Brille oder Kontaktlinse hinderlich oder ungünstig ist wie z. B. Wassersportler oder bei Extremsportarten
- ✓ Für Berufstätige, deren Arbeitsumgebung staubig oder sehr trocken ist
- ✓ Für Kinder und Jugendliche zum Myopiemanagement

Ist die Nachtlinse seefree® ideal für Sie?

Bei einem Beratungstermin können wir diese und alle weiteren Fragen beantworten.

FAQ

Wie lange hält das scharfe Sehen mit dieser Methode an?

In den ersten Tagen lässt das scharfe Sehen gegen Abend wieder nach. Doch nach 3-8 Tagen ist das Sehen über den ganzen Tag stabil. In Einzelfällen kann dies auch etwas länger dauern.

Was geschieht in dieser Anfangszeit, in der das Sehen noch nicht stabil ist?

Für diese Phase werden Sie mit Tageslinsen oder einer geeigneten Brille ausgestattet, so sind Sie gut versorgt.

Muss ich die Kontaktlinsen jede Nacht tragen?

Grundsätzlich ist die Hornhaut bestrebt, wieder zu ihrer ursprüngliche Form zurückzukehren.

Je kürzer die Schlaf- und somit die Tragephase der Nachtlinsen, desto rascher kehrt die Hornhaut in den Ursprungszustand zurück. Deshalb sollen Nachtlinsen regelmäßig über Nacht getragen werden. Optimal ist eine nächtliche Tragezeit von mindestens 6 Stunden.

Ist das Übernachttragen der seefree® schädlich für meine Augen?

Für Nachtlinsen werden ausschließlich höchst sauerstoffdurchlässige Materialien verwendet. Die Tragezeit der seefree® ist meist deutlich kürzer als bei herkömmlichen Kontaktlinsen, die tagsüber getragen werden. Das Auge wird tagsüber optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen durch den Tränenfilm versorgt.

Ein Garant für eine sichere und erfolgreiche Versorgung mit der seefree® sind regelmäßige Kontrollen bei uns, Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.

Stören mich die Kontaktlinsen beim Schlafen?

Das Tragen der see**free**[®] über Nacht ist überraschend komfortabel. Die meisten Kontaktlinsenträger spüren sie bereits wenige Minuten nach dem Aufsetzen nicht mehr. Die Eingewöhnungsphase ist in der Regel sehr kurz und unproblematisch.

Ich möchte meine seefree[®] nicht mehr tragen. Wie lange dauert es, bis ich meine eigene Brille wieder nutzen kann?

Das kann ein paar Tage dauern, je nach Fehlsichtigkeit und Dauer der Anwendung.

Sind Nachtlinsen auch für Weitsichtigkeit (Hyperopie) geeignet?

Leider nein. Diese Methode bringt nur im Bereich der Kurzsichtigkeit (Myopie) bis max. -4,5 dpt die gewünschten Erfolge.

Sind Nachtlinsen auch für Kinder geeignet?

Ja! Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Wo bekomme ich Nachtlinsen?

Die Anpassung einer see**free**[®] erfordert Fachwissen und große Sorgfalt.

Deshalb werden see**free**[®] Kontaktlinsen nur von speziell geschulten Kontaktlinsenspezialisten – wie uns – angepasst.

Wie ist der Anpassablauf?

Ablauf der seefree[®]-Anpassung

1

Bei der Eingangsuntersuchung wird Ihre grundsätzliche Eignung für Nachtlinsen analysiert.

Die Hornhaut wird exakt vermessen und individuell für Sie werden seefree[®] Kontaktlinsen maßangefertigt.

2

Beim nächsten Termin wird die Passform der seefree[®] beurteilt und die genaue Handhabung und Pflege geübt und vertieft.

Sie tragen diese Kontaktlinsen das erste Mal über Nacht.

3

Am nächsten Morgen findet die erste Kontrolle mit der noch aufgesetzten seefree[®] statt. Nach dieser Kontrolle werden die Kontaktlinsen abgesetzt und der erste Seherfolg wird kontrolliert.

4

Am Abend desselben Tages findet erneut eine Kontrolle statt, um die Stabilität der Sehleistung zu prüfen.

5

In der Anfangsphase der Anpassung sind häufigere Kontrollen notwendig, um den Kontaktlinsensitz und die Sehleistung zu überprüfen.


6

Danach erfolgen regelmäßig mindestens halbjährliche Kontrollen.



Wie funktionieren Nachtlinsen?

Die Kontaktlinsen werden über Nacht im Schlaf getragen, um tagsüber ohne jegliche Sehhilfe scharf sehen zu können.

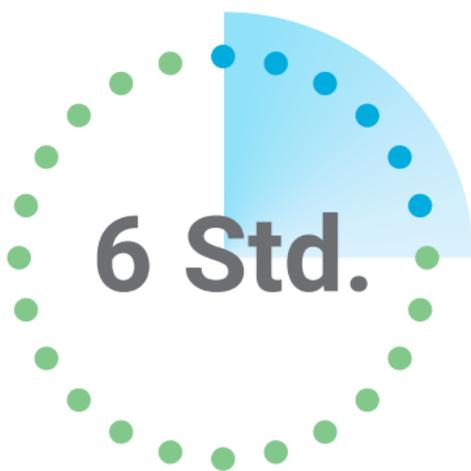

- 1 **Die Kontaktlinsen vor dem Schlafengehen aufsetzen**
- 2 **Mit den Kontaktlinsen mindestens 6 Stunden schlafen**
- 3 **Nach dem Aufwachen die Kontaktlinsen absetzen**

Den ganzen Tag ohne Kontaktlinsen und ohne Brille genießen

Wir sind von HECHT Contactlinsen GmbH autorisiert, **seefree[®]** Kontaktlinsen anzupassen.

Wir beraten Sie gerne zu Ihren Nachtlinsen.
Unverbindlich.

Ihr Kontaktlinsenspezialist

Kontaktdaten



Immer an unserer Seite.
Unser Partner für Kontaktlinsenmaterialien.

**HECHT ist Entwickler und Hersteller maßgefertigter Kontaktlinsen.
Die gesamte Expertise und Kompetenz befindet sich unter einem
Dach. Persönliche Kontaktlinsen – made in Germany.**

HECHT Contactlinsen GmbH
Dorfstraße 2-4
79280 Au bei Freiburg
www.hecht-contactlinsen.de



 **HECHT**
Sichtbar besser