


3-MONATSLINSE **ease**


ease – Grundgeometrie

Die Kombination aus sphärischem Zentrum und asphärischem Randdesign ermöglicht eine besonders gute Abbildung bei sehr schlanker Randgestaltung. Die **ease** ist eine 3-Monatslinse.

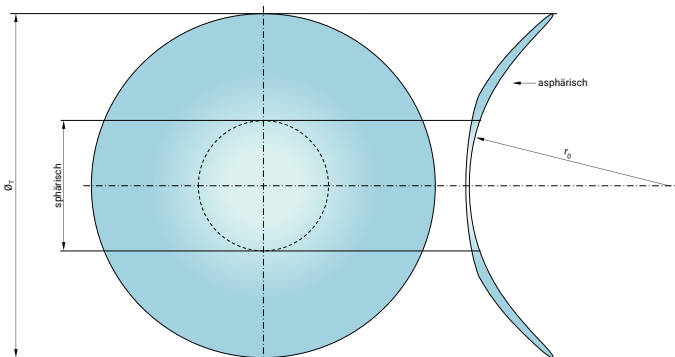

ease – torisch


Die **ease** torisch ist dynamisch stabilisiert. Die Stabilisierungselemente auf der Vorderfläche der Kontaktlinse sind optimal in die Oberfläche integriert. Das sorgt für glatte Übergänge und eine besonders dünne, komfortable Kontaktlinse.

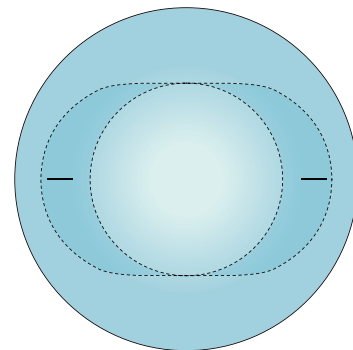

ease – multifokal


Die multifokale Presbyopiekorrektur nach dem simultanen Prinzip ist wahlweise fern- oder nahzentriert. **ease** multiD und **ease** multiN sind auch in torischer Ausführung bis Zylinder -8,00 dpt erhältlich.

ease
multiD/multiD torisch

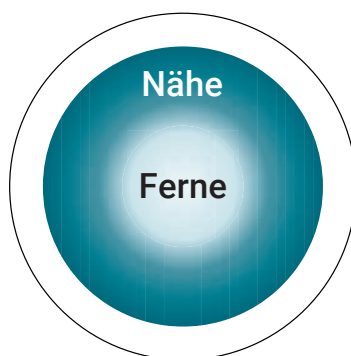

Für gelegentliche Unterstützung im Nahbereich

ease
multiN/multiN torisch

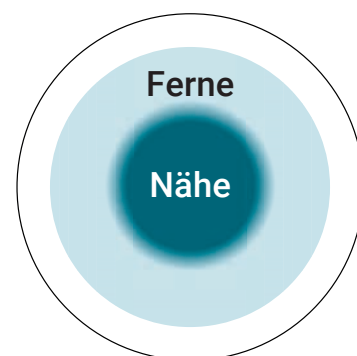

Für optimale Nahunterstützung bei hohem Additionsbedarf

Additionsbedarf in dpt	Alter	Add	Priorität Fernbereich	Priorität Nahbereich	Keine Priorität
< 1.50	< 50	A	multiD	multiN	multiD
1.50–2.00	50–60	B	multiD	multiN	multiN
> 2.00	> 60	C	multiN	multiN	multiN
Zentrale Zone: immer mit M beginnen					

Auswahl der ease

Anamnese

- **Aktuelle** Brillenrefraktion inkl. Fern- und Nahvisus (ohne Addition)
- Bei multifokaler Versorgung zusätzlich **Addition bestimmen und gewünschten Sehbereich festlegen**
- Spaltlampenkontrolle

Topometrie

- Zentrale Hornhautradien
- Exzentrizität
- Hornhautdurchmesser

Berechnung der ease Bestellwerte

- HECHT Webshop
- APEX® Anpasssoftware

Bewertung der ease (1 Std. Tragezeit)

Sitz & Bewegung

- Die **ease** sollte zentrisch sitzen mit wenig bis kaum Bewegung beim reflektorischen (unbewussten) Lidschlag.
- Bei **ease** torisch: Stabilisationsachse messen. (Markierungen horizontal)

Stärke

- Nur sphärische Überrefraktion (auch bei torischer **ease**)
- Erreichten Fern- und Nahvisus notieren.
- Keine Überrefraktion in die Nähe anbieten

Bestellung der optimierten ease

- HECHT Webshop
- APEX® Anpasssoftware



Tipps & Tricks
bei der Anpassung
und Optimierung

Bestelleinheiten

ease ist als Einzellinse (mR)* oder als 3- oder 6-Monatsversorgung (oR) bestellbar.

Hochwertige Produktverpackung:

Bei Bestellung einer 3- bzw. 6-Monatsversorgung wird **ease** automatisch in der attraktiven **ease-box** geliefert.

Parameter		ease ease multiD ease multiN	ease torisch ease multiD torisch ease multiN torisch	Stufen
Sphäre	S'	-30.00 dpt bis +30.00 dpt		0.25 dpt
Zylinder	Cyl	-	-0.50 dpt bis -8.00 dpt	0.25 dpt
Achse	A	-	0° bis 180°	1°
Zentralradius	r ₀	7.5 mm bis 10.0 mm		0.1 mm
Durchmesser	Ø _T	12.0 mm bis 15.4 mm		0.2 mm
Abflachung	AS	S / N / F		
Material		Hioxifilcon-D (hellblau) / SiH-74-UV (farblos)		

Additionsbedarf in dpt	Alter	Add	multiD / multiD torisch	multiN / multiN torisch
< 1.50	< 50	A	X	X
1.50–2.00	50–60	B	X	X
> 2.00	> 60	C		X
Zentrale Zone			M / L	S / M / L

* Zu Anpasszwecken kann die **ease** als Einzellinse mit Rückgabeoption (mR) bestellt werden. Die Gutschrift erfolgt nur bei Rückgabe innerhalb von 2 Monaten. Gutschriften können über den Webshop beantragt werden, ohne Rücksendung der Ware.