

# APEX®


## Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.1

Das **Update** der neuen **APEX®-Software, Version 1.3.1.1**, finden sie auf der Homepage unter: [APEX® ANPASSUNGS-SOFTWARE für Kontaktlinsen.](https://hecht-contactlinsen.de/kontaktlinsen/apex-software/)


Um das Update ausführen zu können, müssen sie über **Admin-Rechte** verfügen.  
Falls sie diese nicht besitzen, wenden sie sich **an ihren eigenen IT-Support**.



➤ Wenn sie das Update erfolgreich heruntergeladen habe, befindet es sich im **Ordner „Downloads“** ihres **Internetbrowsers**.

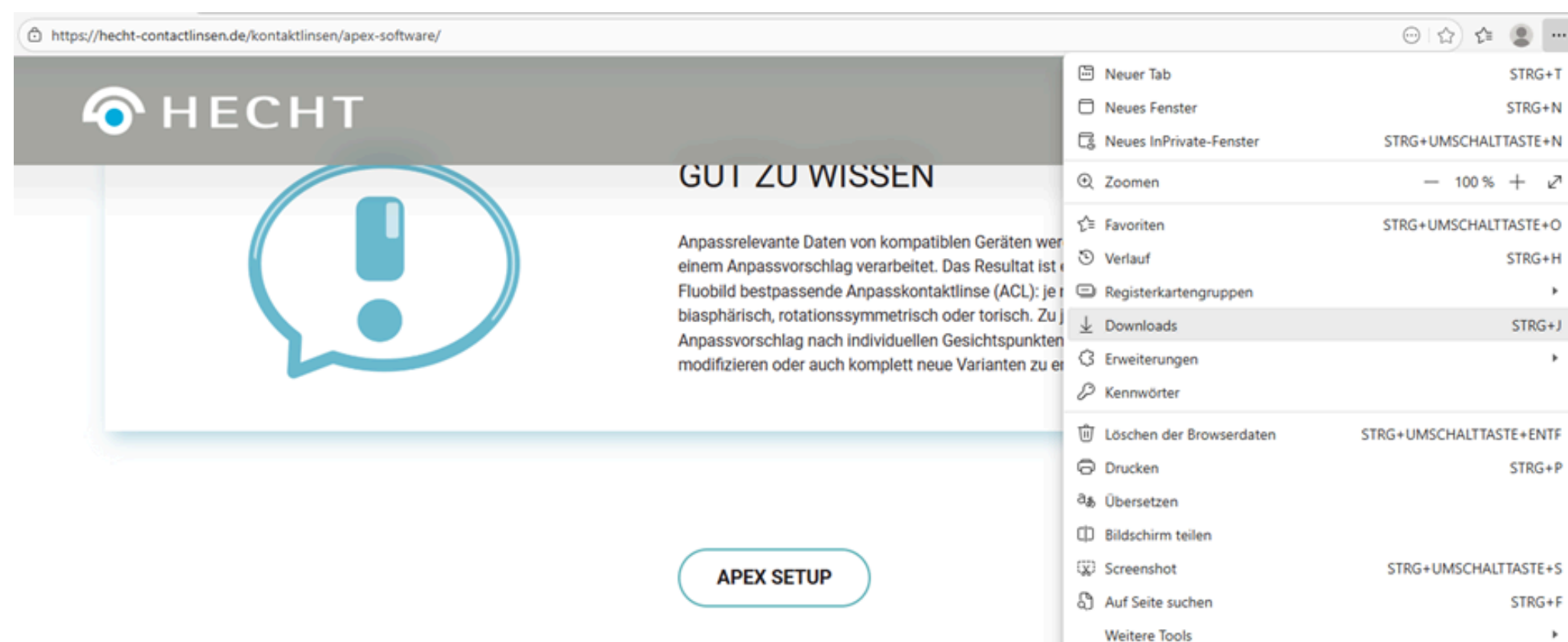

**In diesem Ordner befindet sich die APEX-Setup-1\_3\_1\_1.exe:**

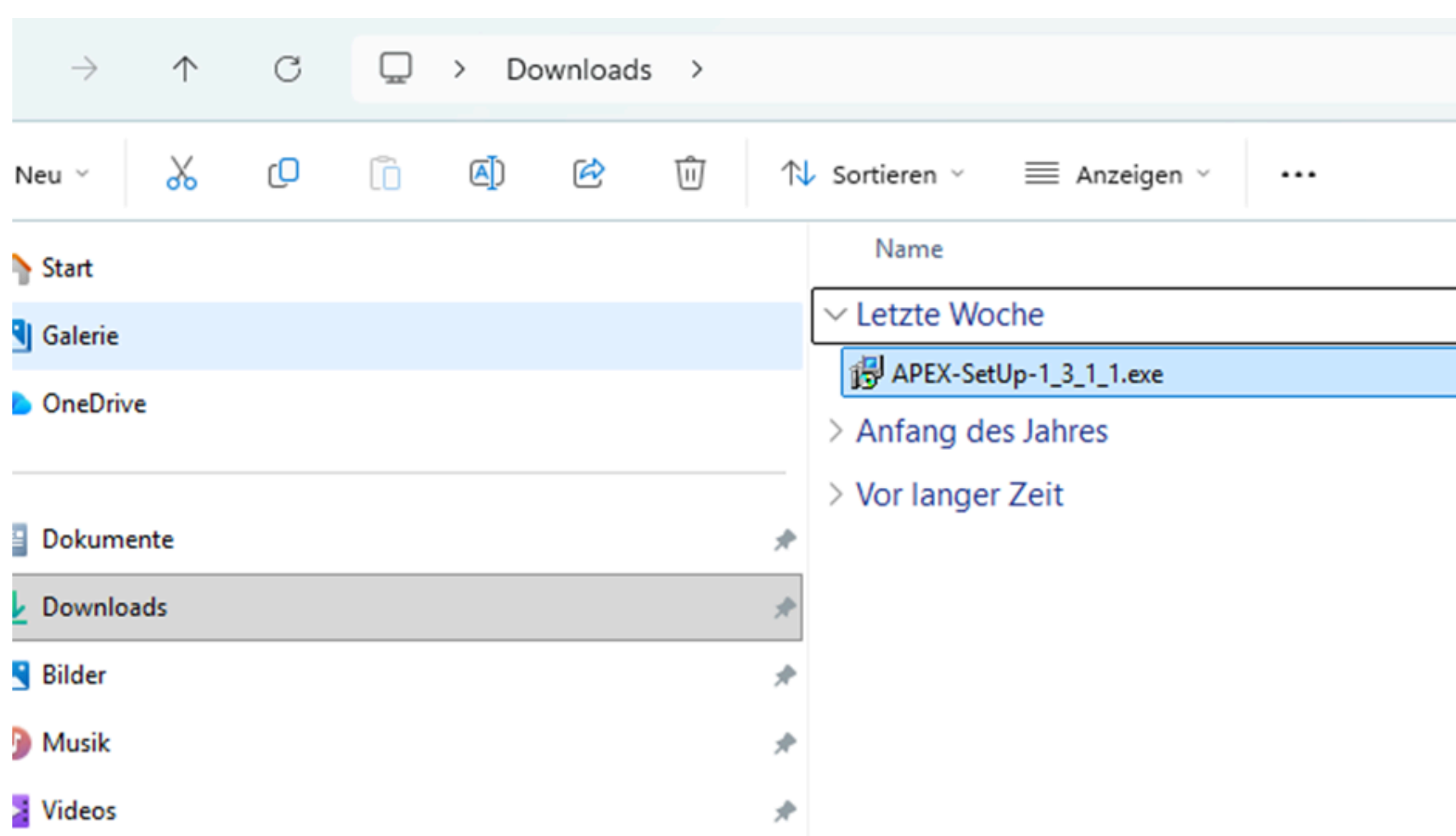


Bevor sie das Setup durch anklicken aktivieren, stellen Sie sicher, dass die **bisherige APEX® - Software und die Software ihres OCULUS-Gerätes geschlossen sind**.  
Mit einem **Doppelklick auf die „APEX-Setup-1\_3\_1\_1.exe“** öffnet sich das erste Dialogfenster.





# APEX®

## Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.1


➤ Bitte wählen sie ihre Sprache aus. Und Bestätigen das Fenster mit „OK“.

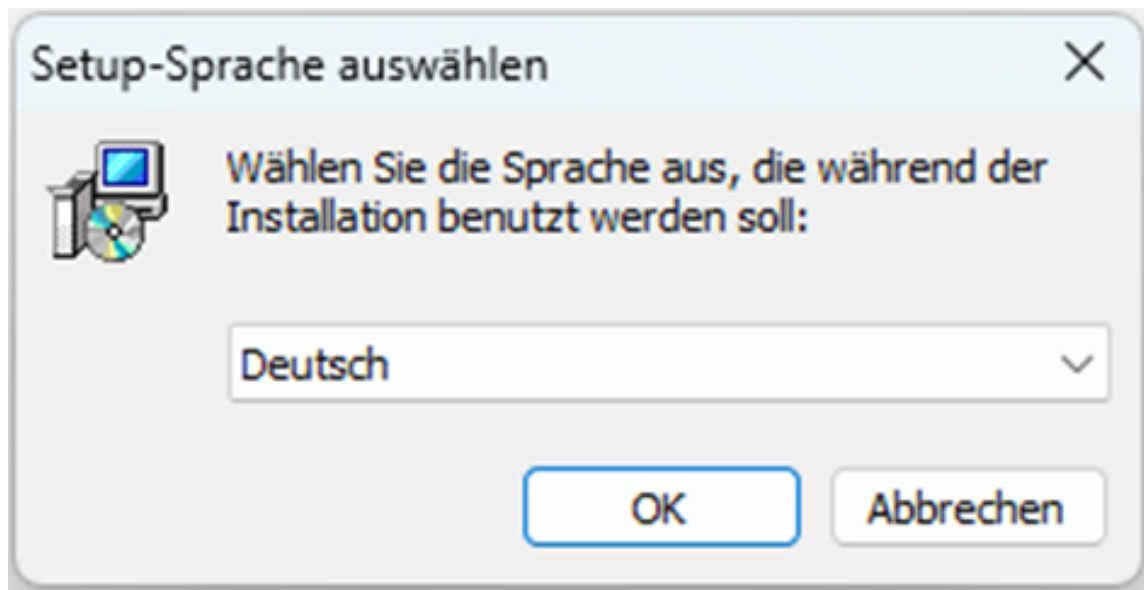

➤ Lesen sie ihre **Lizenzvereinbarung**.  
➤ Wenn sie die Vereinbarung **akzeptieren**, können sie die Seite mit „Weiter >“ bestätigen.

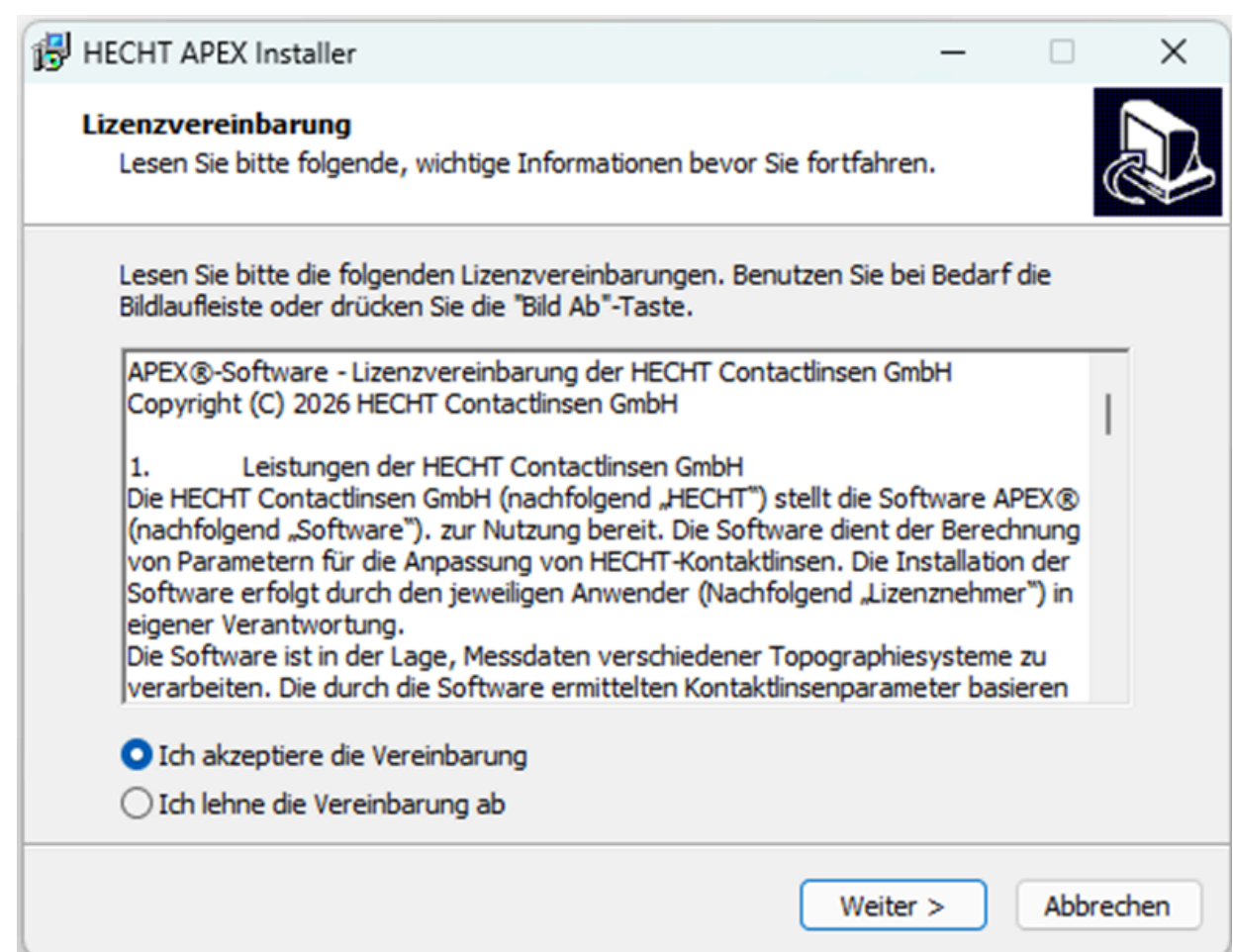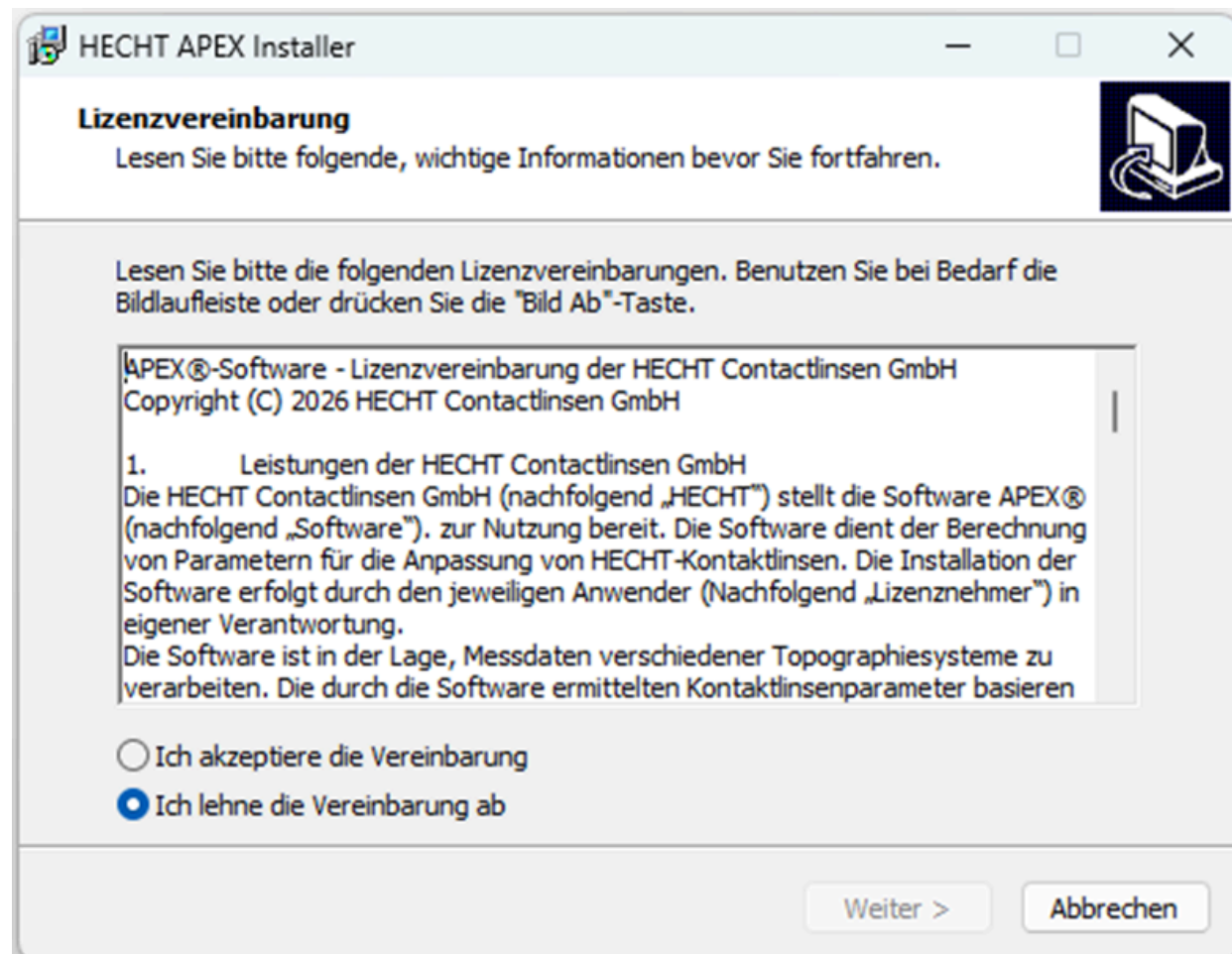


➤ Wählen sie nun aus, ob ein **Desktopsymbol** angelegt werden soll und bestätigen sie ihre Angabe mit „Weiter >“.

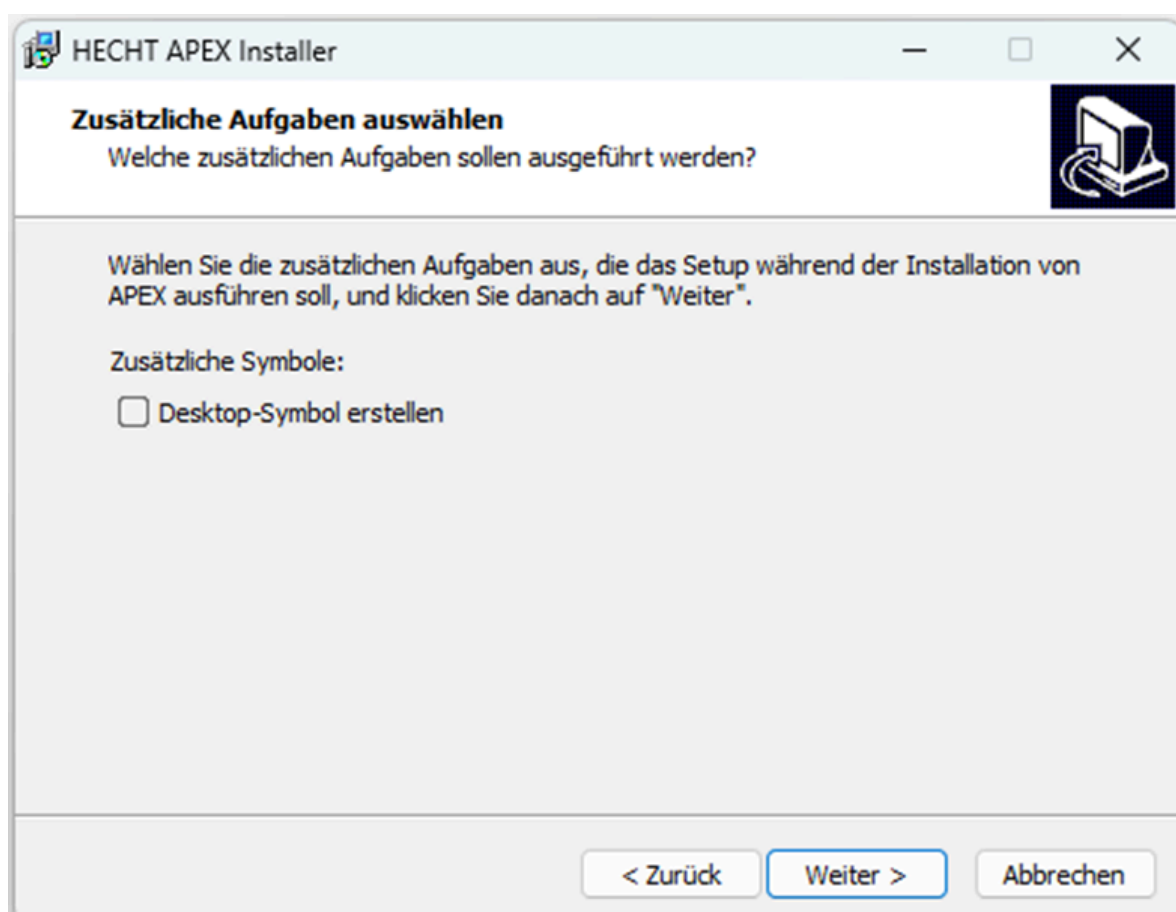


# APEX®

## Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.1

- Nun können sie die Installation durch einen Klick auf „**Installieren**“ starten.

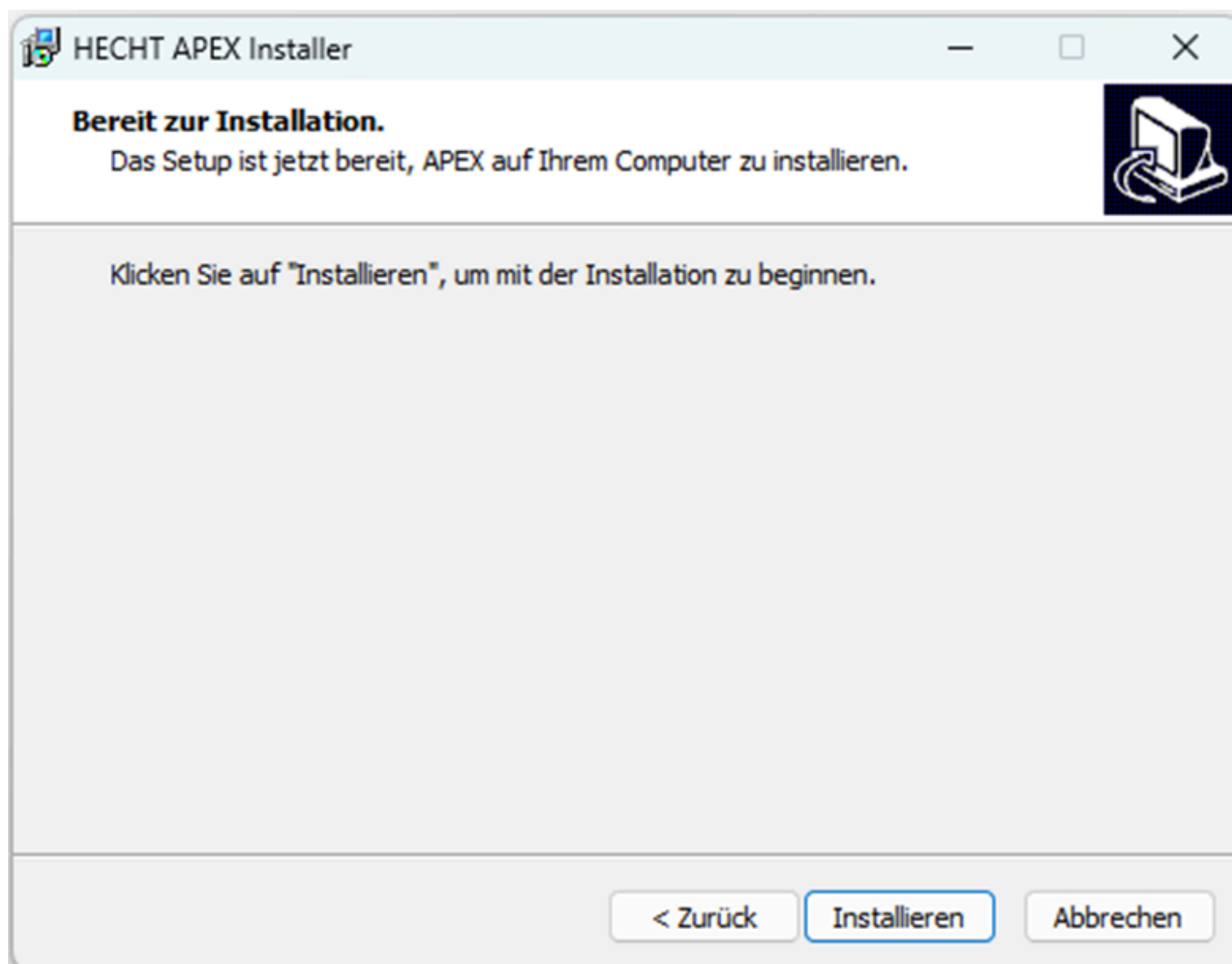


- Am **Ende der Installation** erhalten sie eine kurze Übersicht, der Verbesserungen, die die neue Version besitzt. Mit der Bestätigung über „**Weiter >**“ gelangen sie zum Ende der Installation.

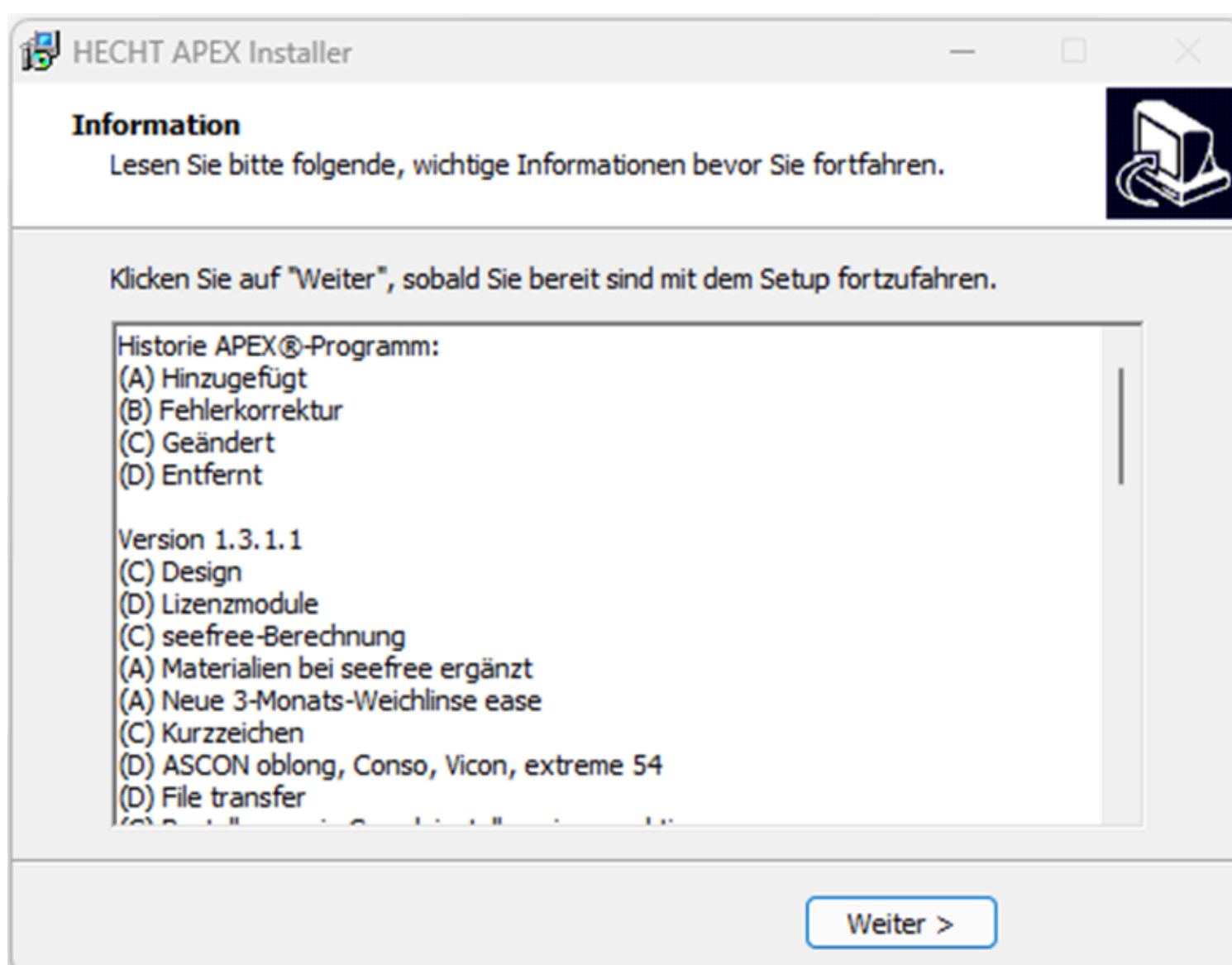


# APEX®

## Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.1

- Mit dem Klick auf „**Fertigstellen**“ beenden sie den Installationsassistenten.

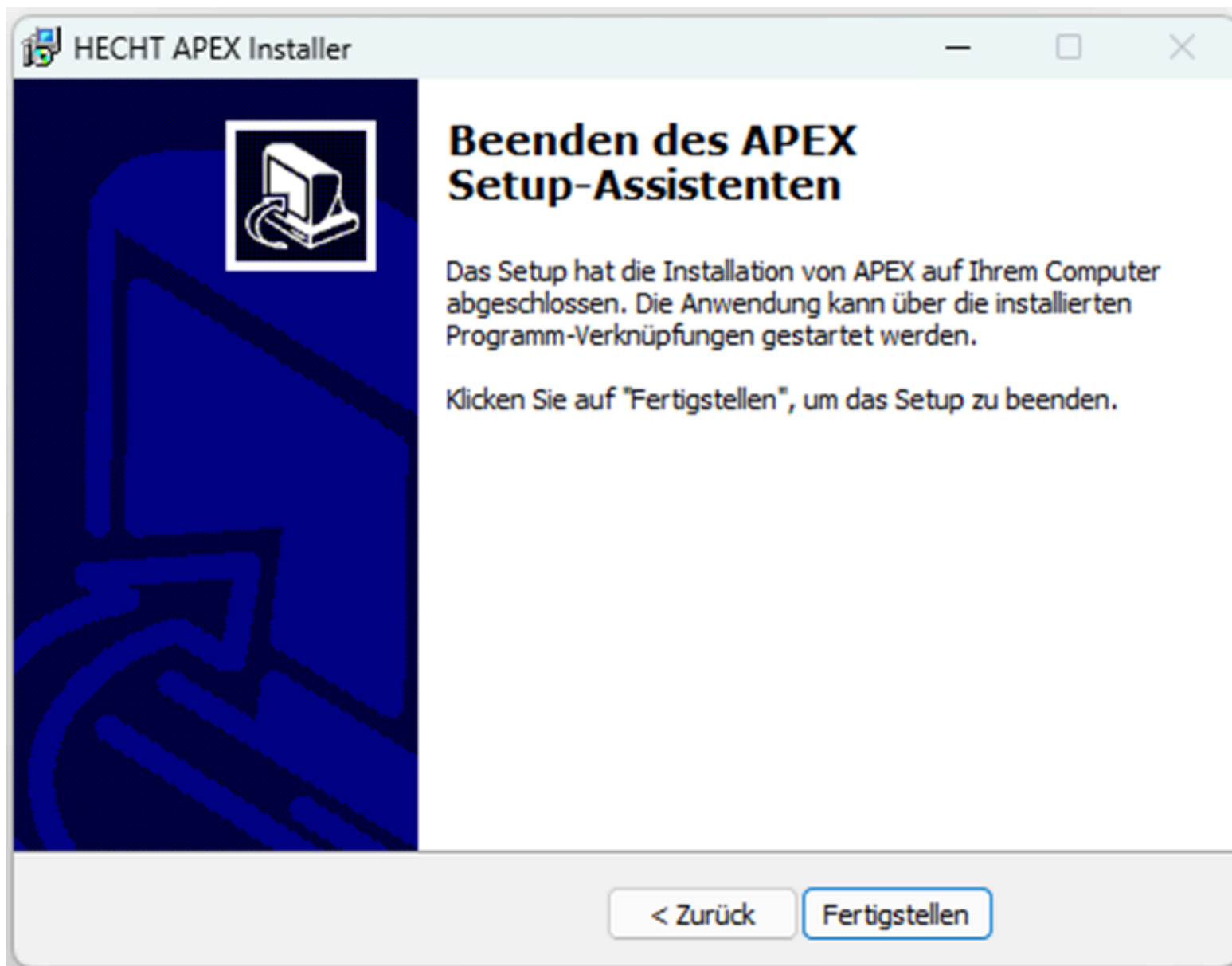

- Nun können Sie die neue **APEX®-Version 1.3.1.1** nutzen.
- **Öffnen Sie die Messung** eines Auges, öffnen sie den **Menüpunkt Darstellung „Kontaktlinsenanpassung“**, **wechseln sie auf der rechten Seite auf den Button „HECHT KL“**. Die neue APEX® Version öffnet sich.

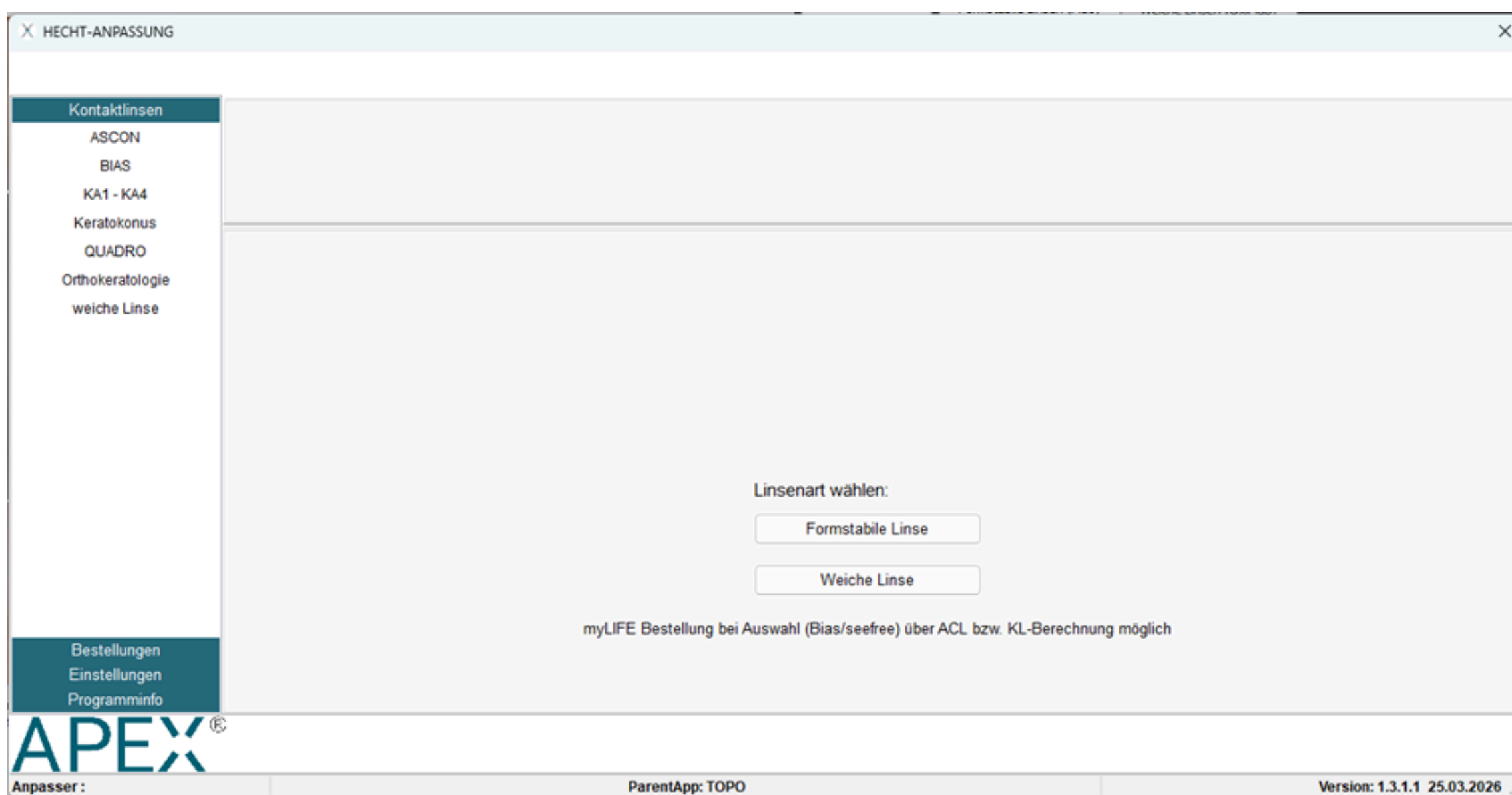

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.  
Ihr HECHT Contactlinsen Team