



**Sklerallinsen
Tipps rund um die Handhabung**


Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Sklerallinsen!

Wir wünschen Ihnen von Anfang an viel Freude am Sehen mit Ihren neuen Linsen.

Schauen Sie sich die folgenden Hinweise an, um eine anhaltende Zufriedenheit, Sicherheit und lange Lebensdauer Ihrer Linsen zu gewährleisten.

Hinweise zur Hygiene

- Waschen Sie bitte Ihre Hände immer gründlich, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen handhaben.
- Trocknen Sie Ihre Hände mit einem fusselfreien Handtuch ab.
- Verwenden Sie zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen ausschließlich die empfohlenen Pflegemittel.

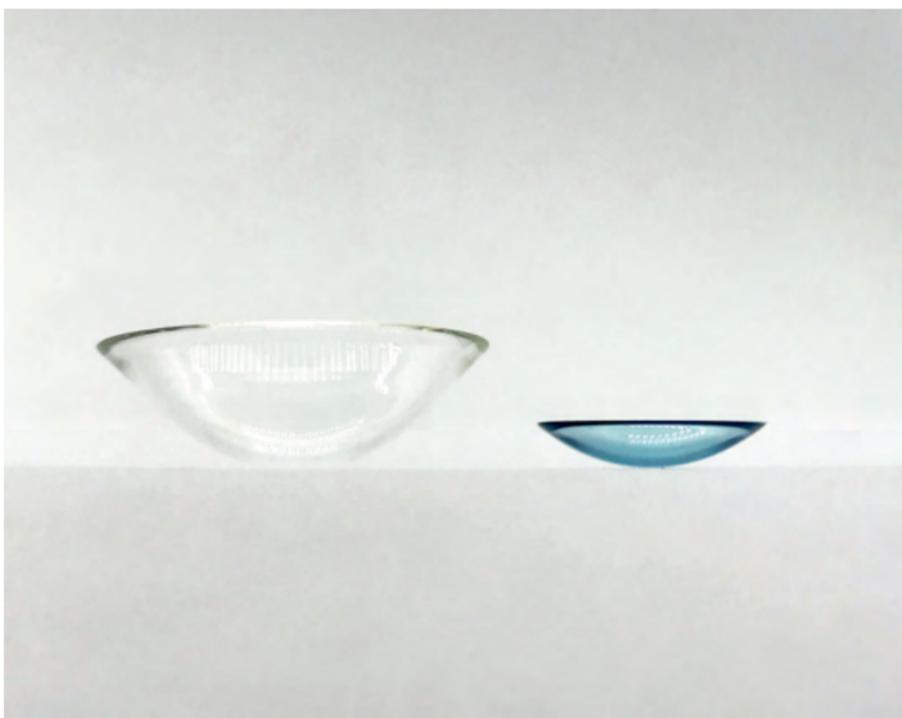

Sklerallinsen richtig aufsetzen

- 1 Legen Sie die Sklerallinse auf die vorgesehene Aufsetzhilfe.



- 2 Füllen Sie die Sklerallinse randvoll mit konservierungsmittelfreier Kochsalzlösung, um diese dann möglichst ohne Luftblase aufzusetzen.

Verwenden Sie einen auf dem Tisch liegenden Spiegel. Beugen Sie Ihren Kopf möglichst nahe über den Spiegel und ziehen Ihr Kinn Richtung Brust, so dass Ihr Gesicht parallel zum Tisch ist. Beobachten Sie alle weiteren Handhabungsschritte mit beiden Augen.

Schauen Sie beim Aufsetzen immer in den Spiegel und nicht auf die Aufsetzhilfe mit der Kontaktlinse.

③ Ziehen Sie Ihr Oberlid mit dem Zeigefinger Ihrer freien Hand nach oben. Nutzen Sie den Daumen oder Mittelfinger der gleichen Hand, um das Unterlid nach unten zu ziehen. Halten Sie beide Augen weit geöffnet, während Sie direkt in den Spiegel schauen. Setzen Sie die Sklerallinse mit Kochsalzlösung gefüllt möglichst mittig auf das Auge.



Zuerst spüren Sie die Flüssigkeit, dann drücken Sie die Linse sanft auf Ihr Auge.

Die Linse liegt nun leicht auf der Augenoberfläche an. Schließen Sie langsam Ihr Auge und führen Sie dabei Ihren Kopf von der Aufsetzhilfe weg.

Tipps beim Aufsetzen

1 Das Auge muss beim Aufsetzen der Sklerallinse weit geöffnet sein. Es kommt auf die Größe und Form der geöffneten Lidspalte an.



FALSCH!

Die Fingerspitzen sind nicht zentriert, die Lidspalte ist verzogen und ist nicht kreisförmig.



FALSCH!

Die Lider sind von den Fingerspitzen abgerutscht, die Lidspalte ist nicht weit genug geöffnet.




KORREKT!

Es ist eine große Öffnung mit viel Spielraum für das Aufsetzen der Sklerallinse entstanden. Die Wimpern werden dabei mit festgehalten.

2 Die Sklerallinse muss innerhalb dieses Bereiches zentriert werden. Verfolgen Sie über den Spiegel die Linsenposition. Nutzen Sie gegebenenfalls die Mitte der Aufsetzhilfe als Orientierung.

Tipps beim Aufsetzen

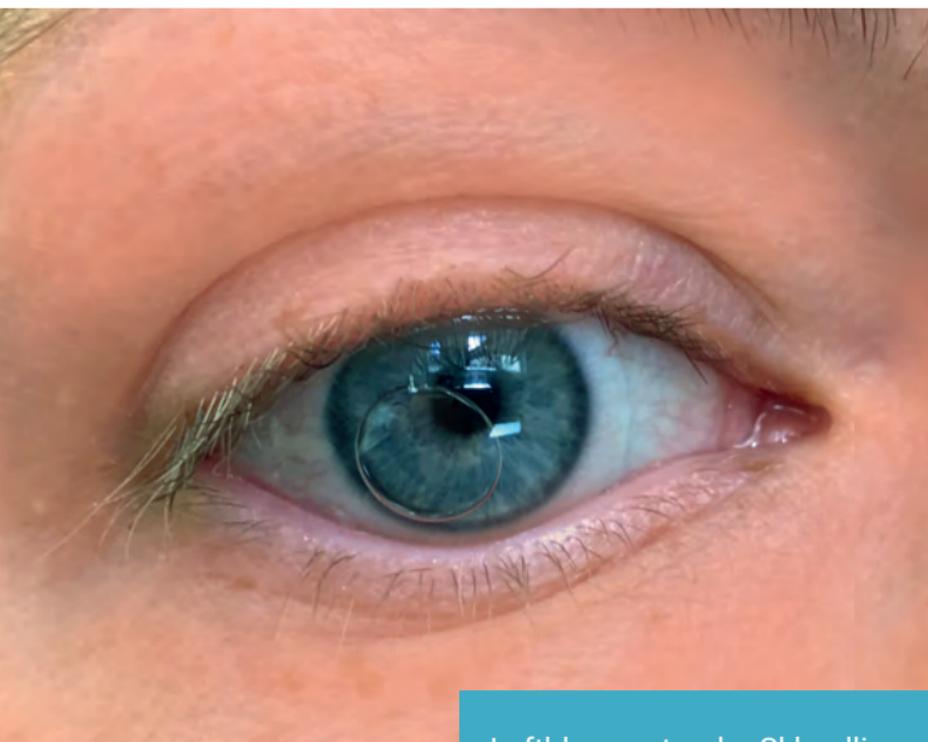


Luftblase unter der Sklerallinse

- 3 Die Aufsetzhilfe muss so zum Auge positioniert werden, dass die Kochsalzlösung in der Vertiefung der Sklerallinse verbleibt, damit beim Aufsetzen keine Luftblasen entstehen.
- 4 Überprüfen Sie, ob unter der Sklerallinse Luftblasen eingeschlossen sind. In diesem Fall muss die Linse abgesetzt und erneut mit dem Aufsetzen begonnen werden.

Wichtig beim Absetzen der Linsen

- 1 Befeuchten Sie Ihr Auge mit konservierungsmittelfreier Nachbenetzungs- oder Kochsalzlösung.
- 2 Massieren Sie mit dem Unterlid den unteren Sklerallinsenrand, damit sich die Linse auf dem Auge lockert.
- 3 Halten Sie Ihr Ober- und Unterlid mit der freien Hand genauso weit geöffnet wie beim Aufsetzen der Kontaktlinse.
- 4 Setzen Sie nun den leicht angefeuchteten Sauger im unteren Randbereich auf die Sklerallinse.

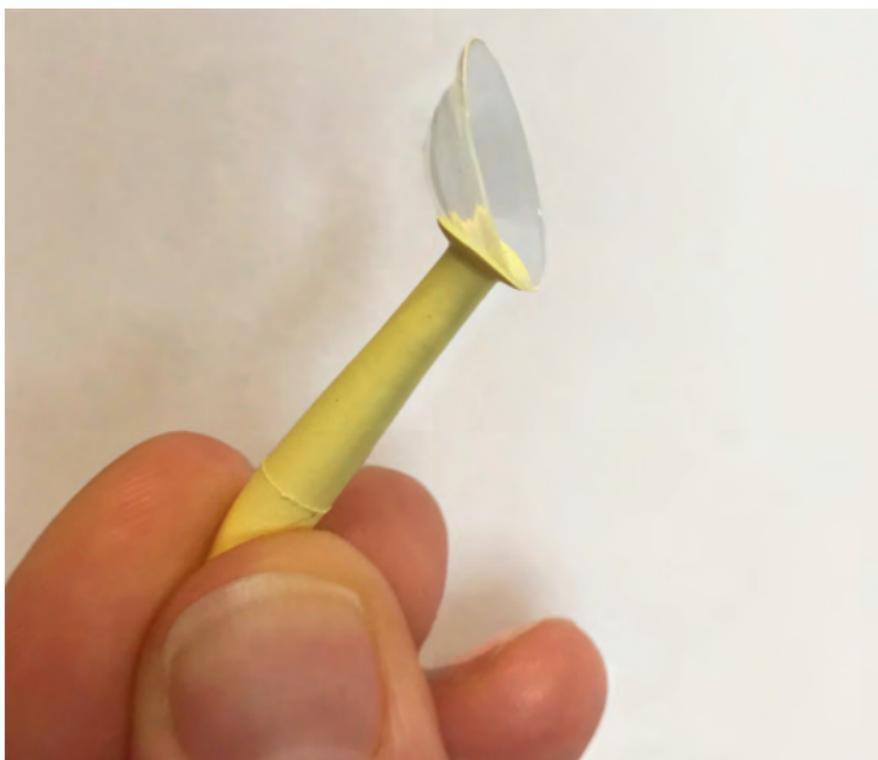

- 5 Kippen Sie den Sauger von unten nach oben, so dass im unteren Sklerallinsenbereich die Sogwirkung unterbrochen wird.
- 6 Die Linse kann nun langsam vom Auge entfernt werden. Lassen Sie die Lider nicht los, bis die Sklerallinse vom Auge abgenommen werden konnte.

Die richtige Pflege

Eine gründliche Pflege Ihrer Sklerallinsen ist die Grundlage für sicheres und erfolgreiches Tragen.
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Pflegesystems.

Das passende Pflegesystem für Sie:

Reiniger

Aufbewahrung/Desinfektion

Nachbenetzungs-/Kochsalzlösung



Immer an unserer Seite.
Unser Partner für Kontaktlinsenmaterialien.

HECHT ist Entwickler und Hersteller maßgefertigter Kontaktlinsen. Die gesamte Expertise und Kompetenz befindet sich unter einem Dach. Persönliche Kontaktlinsen – made in Germany.

HECHT Contactlinsen GmbH
Dorfstraße 2-4
79280 Au bei Freiburg
www.hecht-contactlinsen.de



HECHT
Sichtbar besser

