

# seefree® - auf den ersten Blick

## Vorbereitung für die erste Nacht

### Aufsetzen der seefree®

Legen Sie die seefree® auf einen Finger und füllen Sie die Kontaktlinse mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. CONCARE® HY-LUB), danach vornübergebeugt aufsetzen. Ein liegender Spiegel ist hier hilfreich.



Sollte die Sicht mit aufgesetzter seefree® auf einem Auge unscharf sein, so muss diese mit dem Sauger abgesetzt und nochmals mit Flüssigkeit befüllt aufgesetzt werden.

Gehen Sie möglichst direkt nach dem Aufsetzen der seefree® zu Bett und schließen Sie die Augen. Vor der ersten Nacht bitte nicht mit aufgesetzten seefree®-Linsen lesen oder fernsehen!

## Kontaktlinsenfarbe

seefree® rechts: \_\_\_\_\_ seefree® links: \_\_\_\_\_

## Der erste Morgen

Nach der ersten Nacht bleiben die seefree® zunächst auf Ihren Augen. Die Überprüfung und Abnahme der seefree® findet bei uns, Ihrem Kontaktlinsenspezialisten, statt.

**Wichtig:** Sollten Sie wider Erwarten Unwohlsein oder Schmerzen empfinden, setzen Sie die seefree® mit dem Sauger selbst ab und bringen Sie diese zum Kontrolltermin mit!

Meine Kontaktperson

Tel./E-Mail

