

APEX®


Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.2

Das **Update** der neuen **APEX®-Software, Version 1.3.1.2**, finden sie auf der Homepage unter:
[APEX® ANPASSUNGS-SOFTWARE für Kontaktlinsen.](https://hecht-contactlinsen.de/kontaktlinsen/apex-software/)


Um das Update ausführen zu können, müssen sie über **Admin-Rechte** verfügen.
 Falls sie diese nicht besitzen, wenden sie sich **an ihren eigenen IT-Support**.



➤ Wenn sie das Update erfolgreich heruntergeladen habe, befindet es sich im
Ordner „Downloads“ ihres Internetbrowsers.

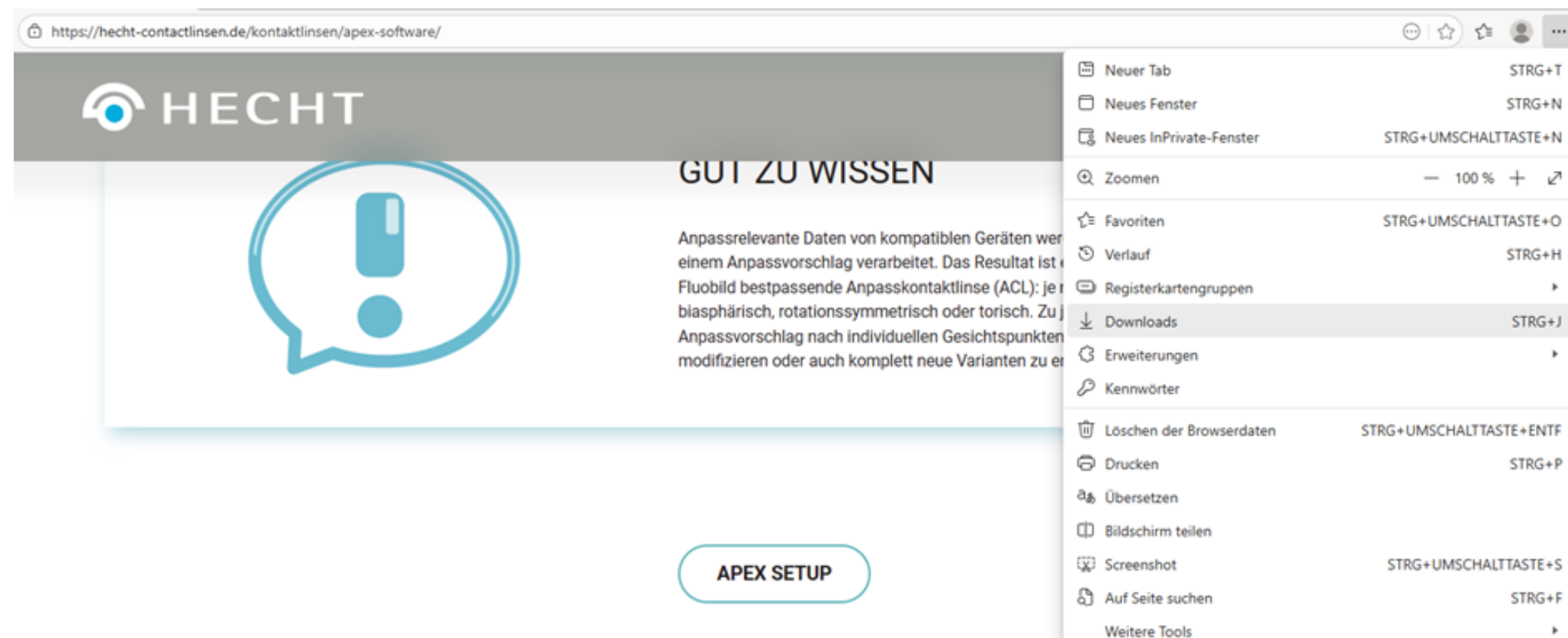

In diesem Ordner befindet sich die APEX-SetUp-1_3_1_2.exe:

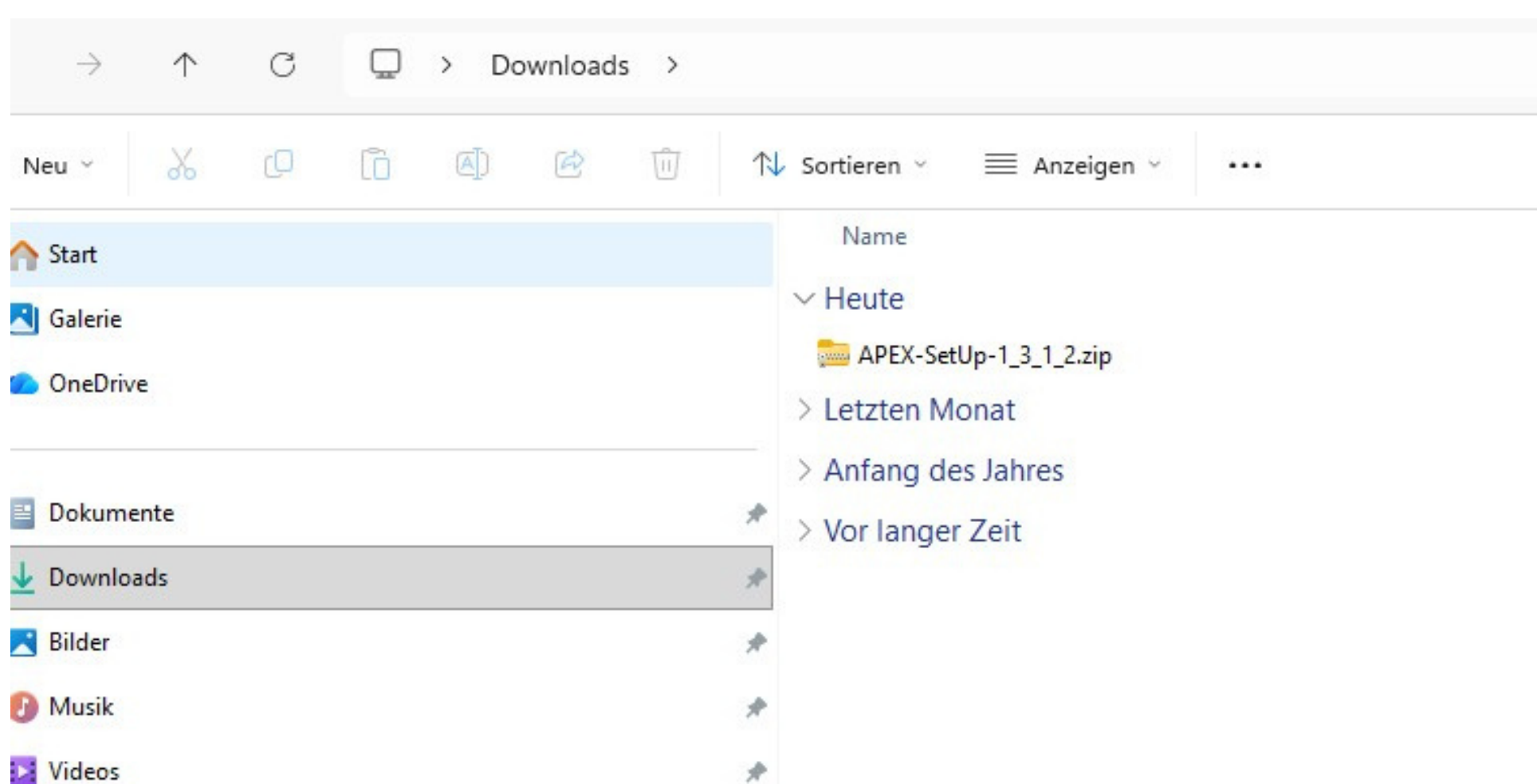


Bevor sie das Setup durch anklicken aktivieren, stellen Sie sicher, dass die **bisherige APEX® - Software und die Software ihres OCULUS-Gerätes geschlossen sind**.
 Mit einem **Doppelklick auf die „APEX-SetUp-1_3_1_2.exe“** öffnet sich das erste Dialogfenster.





APEX®

Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.2


➤ Bitte wählen sie ihre Sprache aus. Und Bestätigen das Fenster mit „OK“.

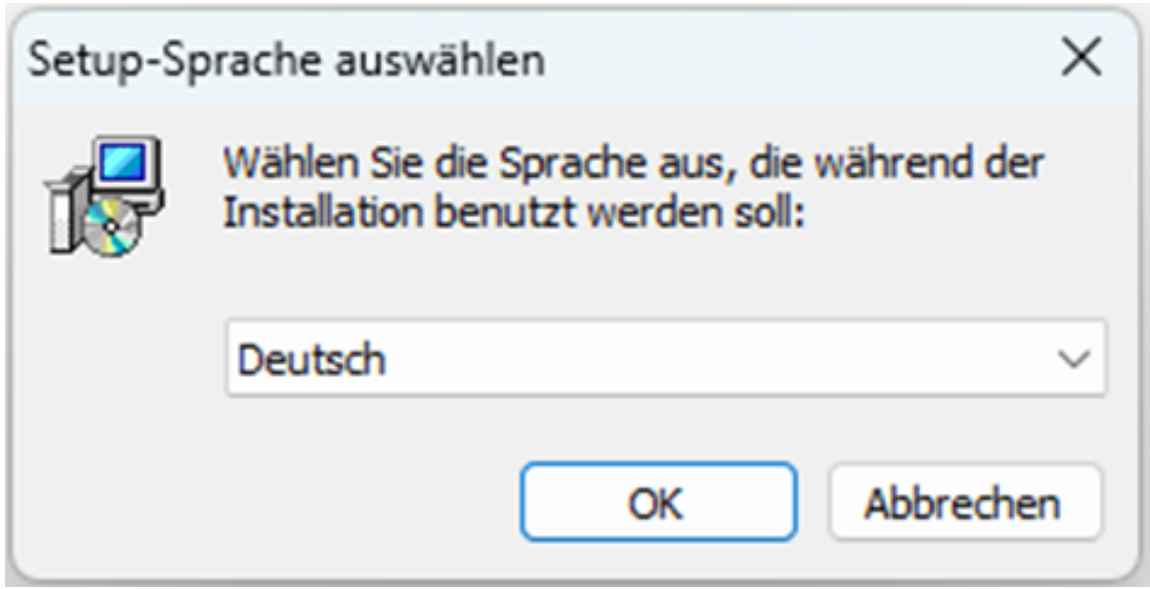

➤ Lesen sie ihre **Lizenzvereinbarung**.
➤ Wenn sie die Vereinbarung **akzeptieren**, können sie die Seite mit „**Weiter >**“ bestätigen.

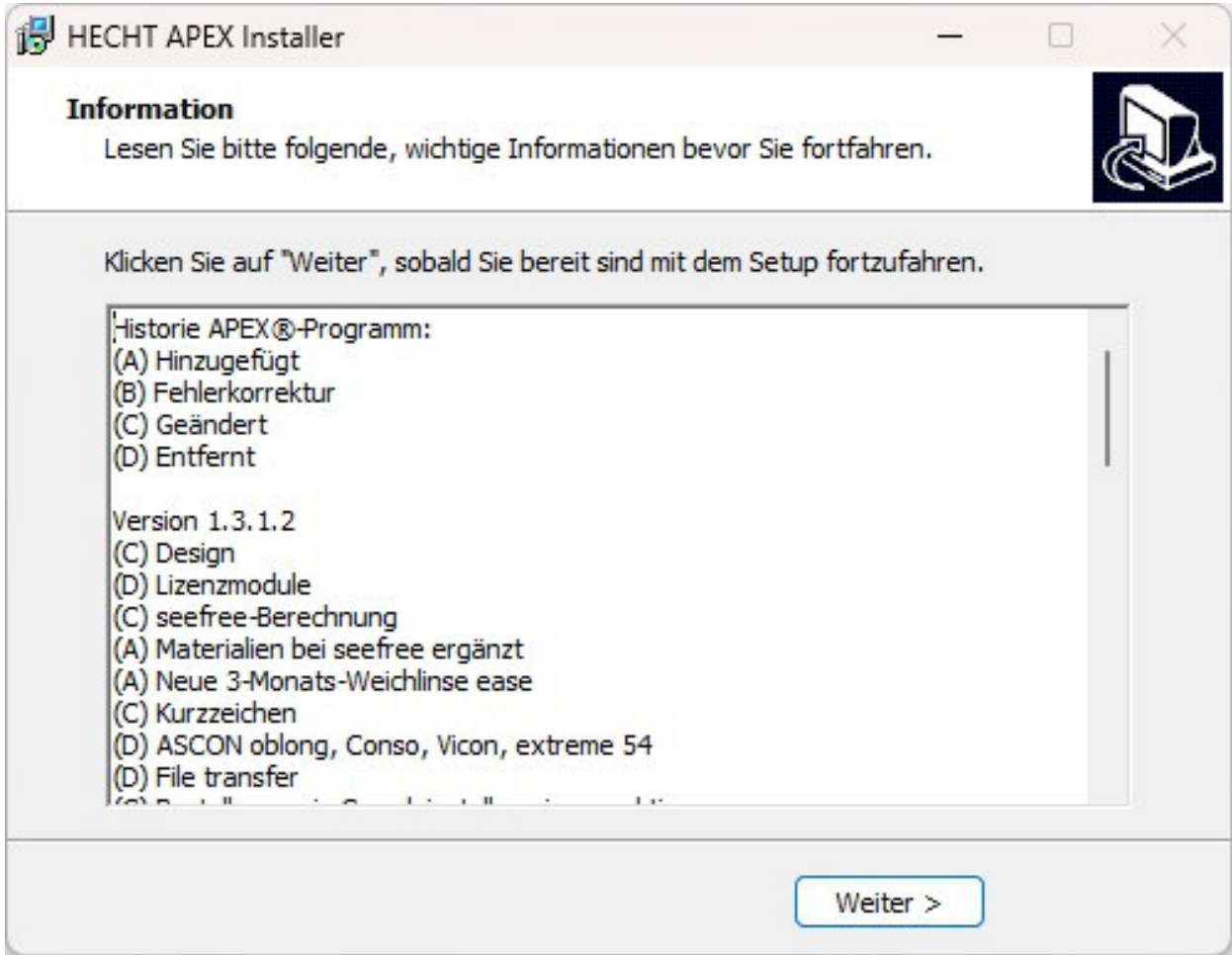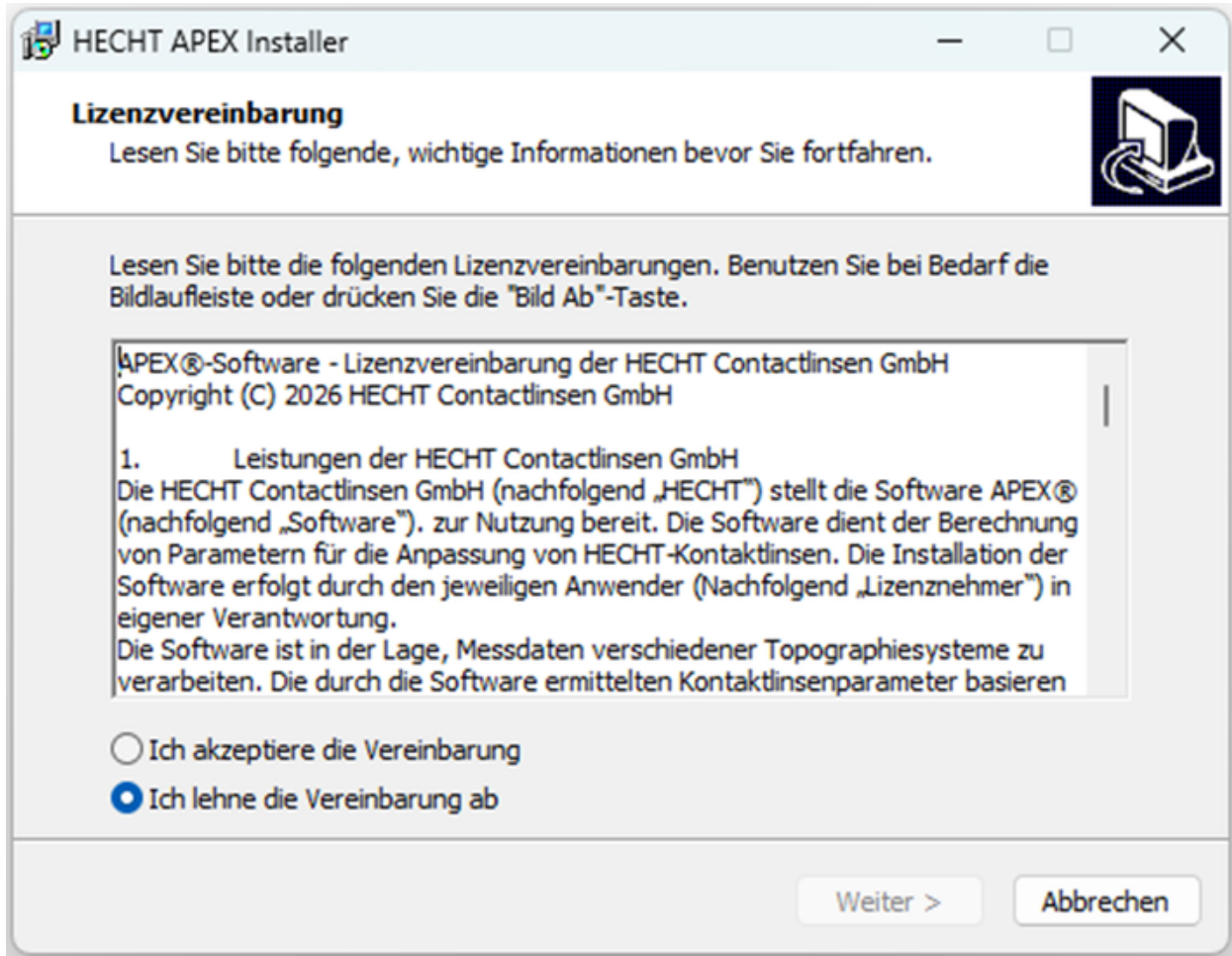


➤ Wählen sie nun aus, ob ein **Desktopsymbol** angelegt werden soll und bestätigen sie ihre Angabe mit „**Weiter >**“.

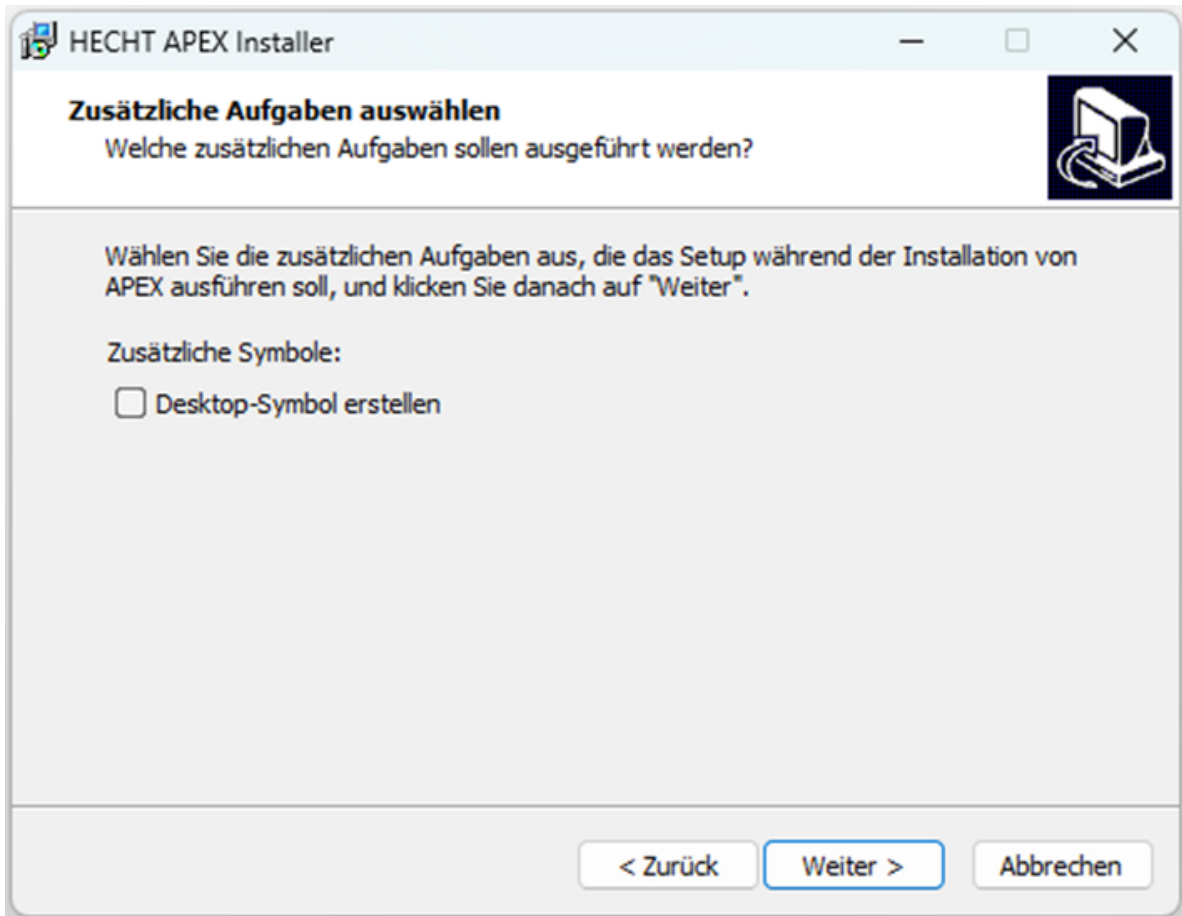


APEX®

Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.2

- Nun können sie die Installation durch einen Klick auf „**Installieren**“ starten.

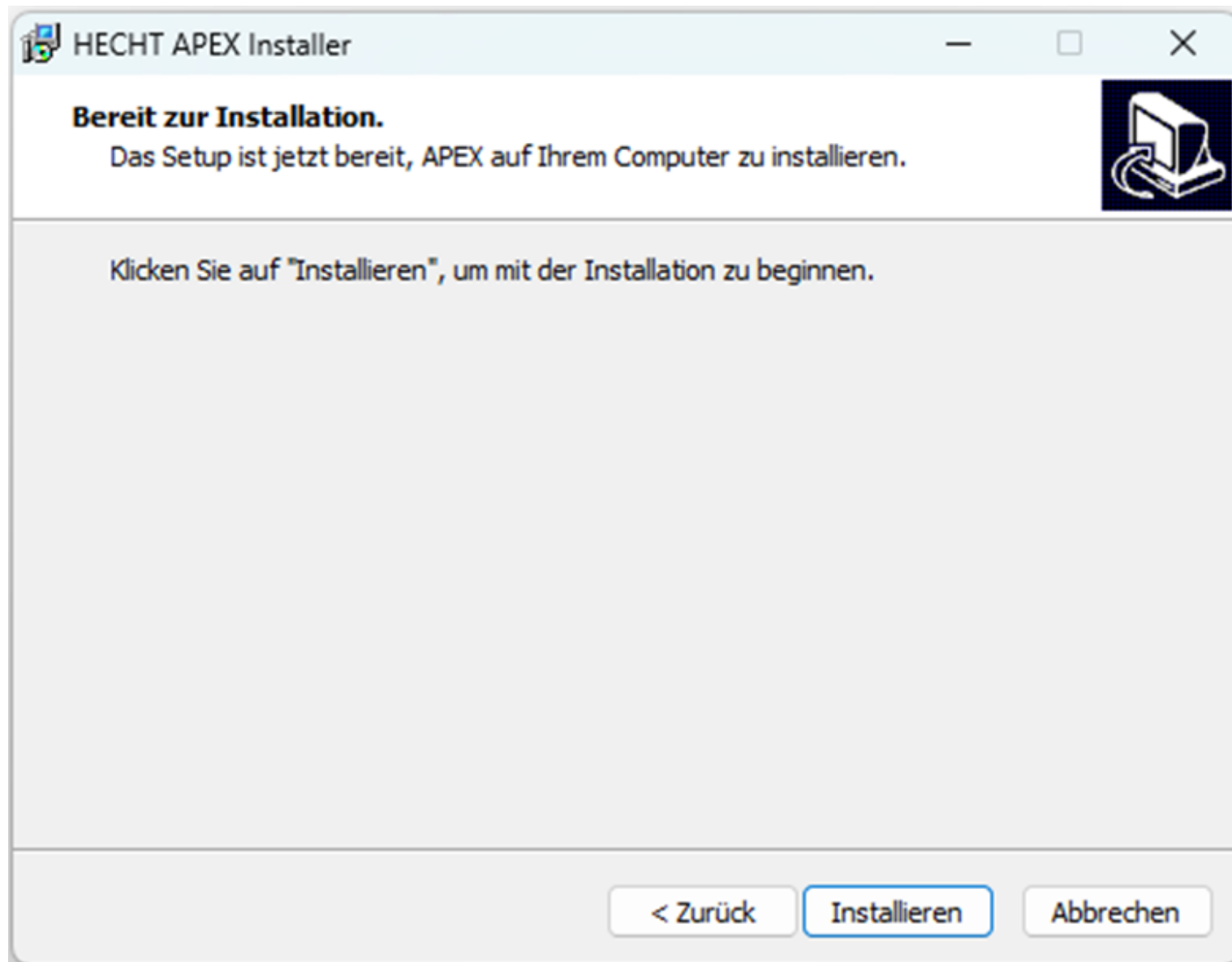


- Am **Ende der Installation** erhalten sie eine kurze Übersicht, der Verbesserungen, die die neue Version besitzt. Mit der Bestätigung über „**Weiter >**“ gelangen sie zum Ende der Installation.

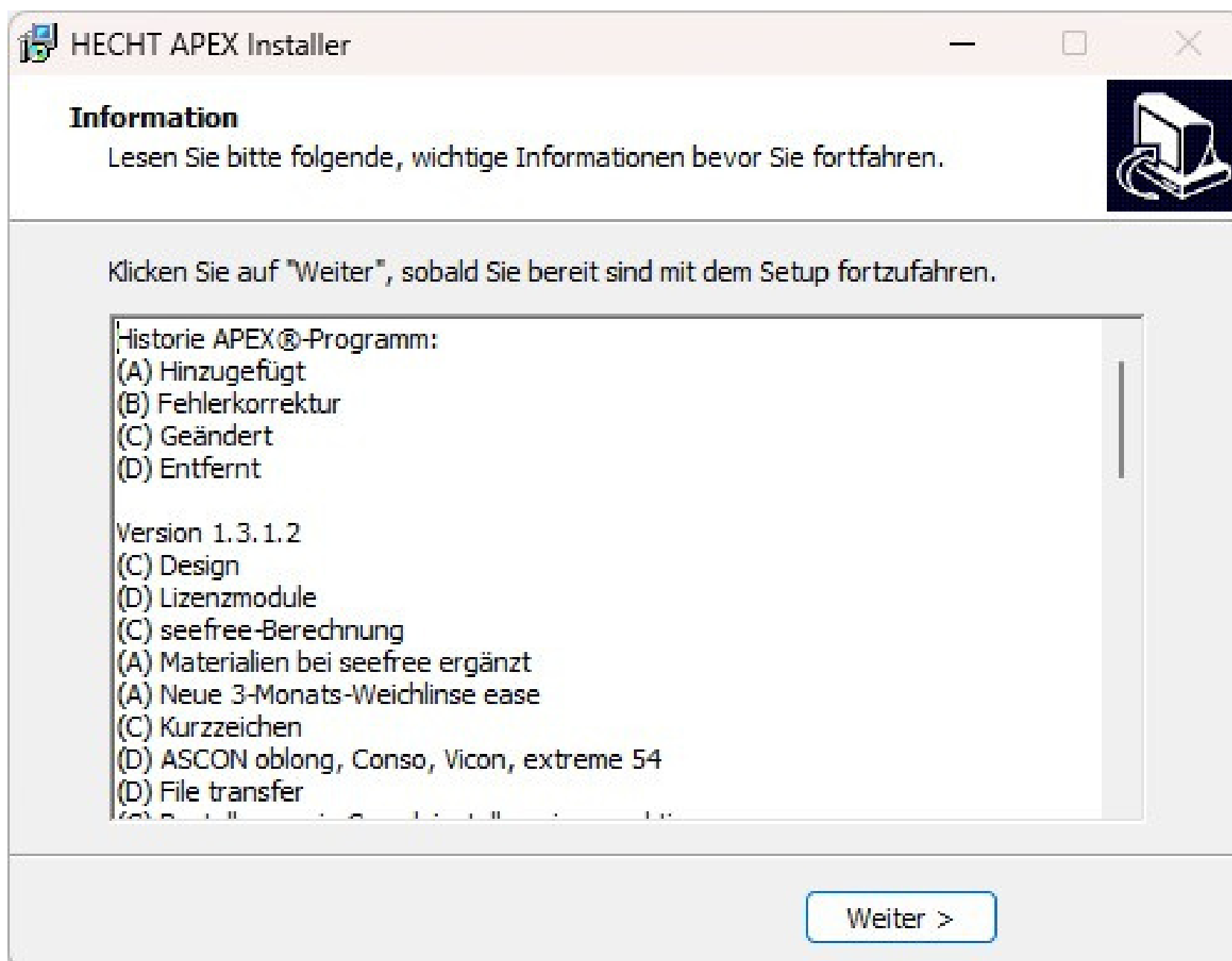

APEX®


Kurzanleitung zur Installation von APEX® Version 1.3.1.2

➤ Mit dem Klick auf „**Fertigstellen**“ beenden sie den Installationsassistenten.

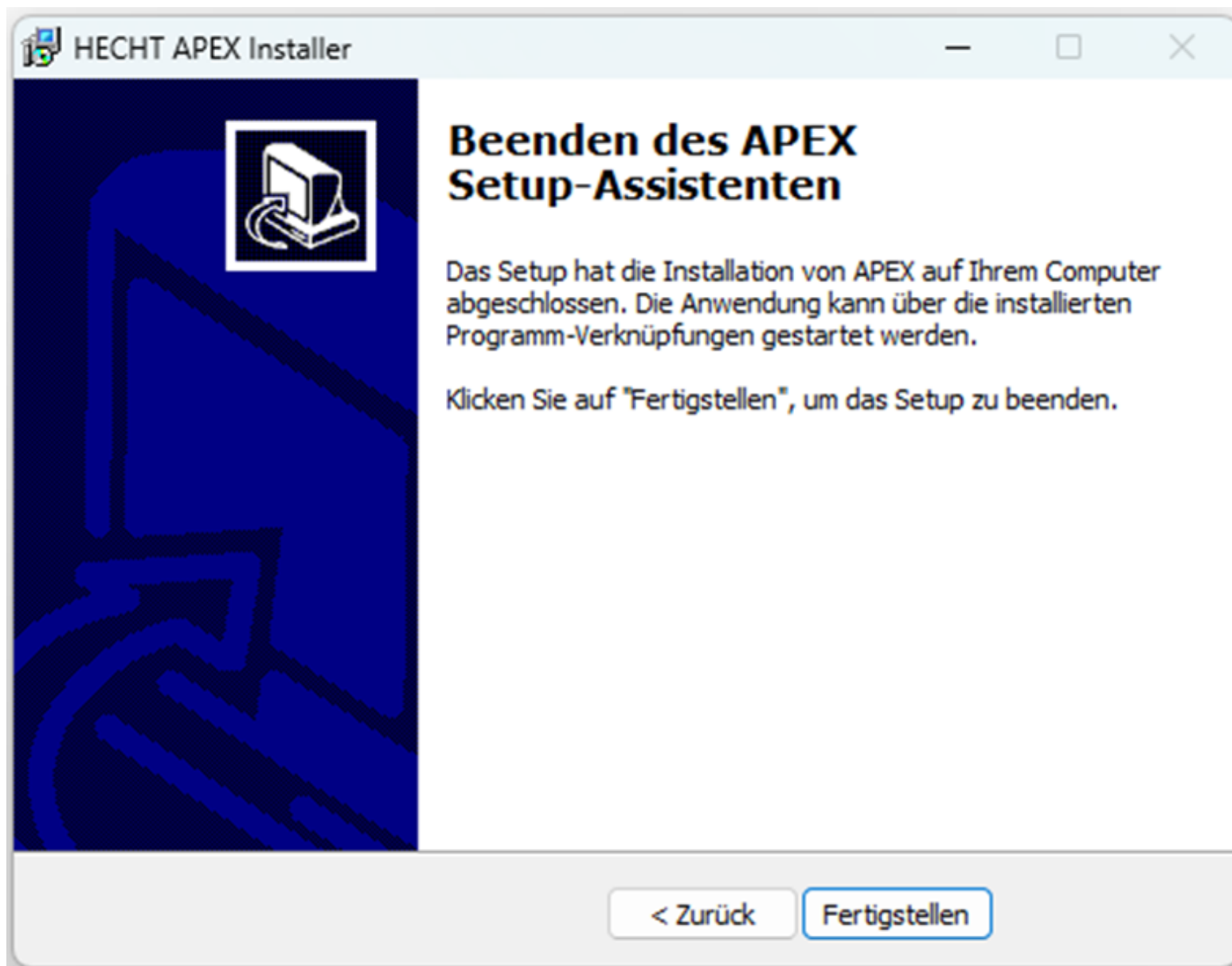

Nun können Sie die neue **APEX®-Version 1.3.1.2** nutzen.

➤ Öffnen Sie die **Messung** eines Auges, öffnen sie den **Menüpunkt Darstellung „Kontaktlinsenanpassung“**, wechseln sie auf der rechten Seite auf den Button „**HECHT KL**“. Die neue APEX® Version öffnet sich.

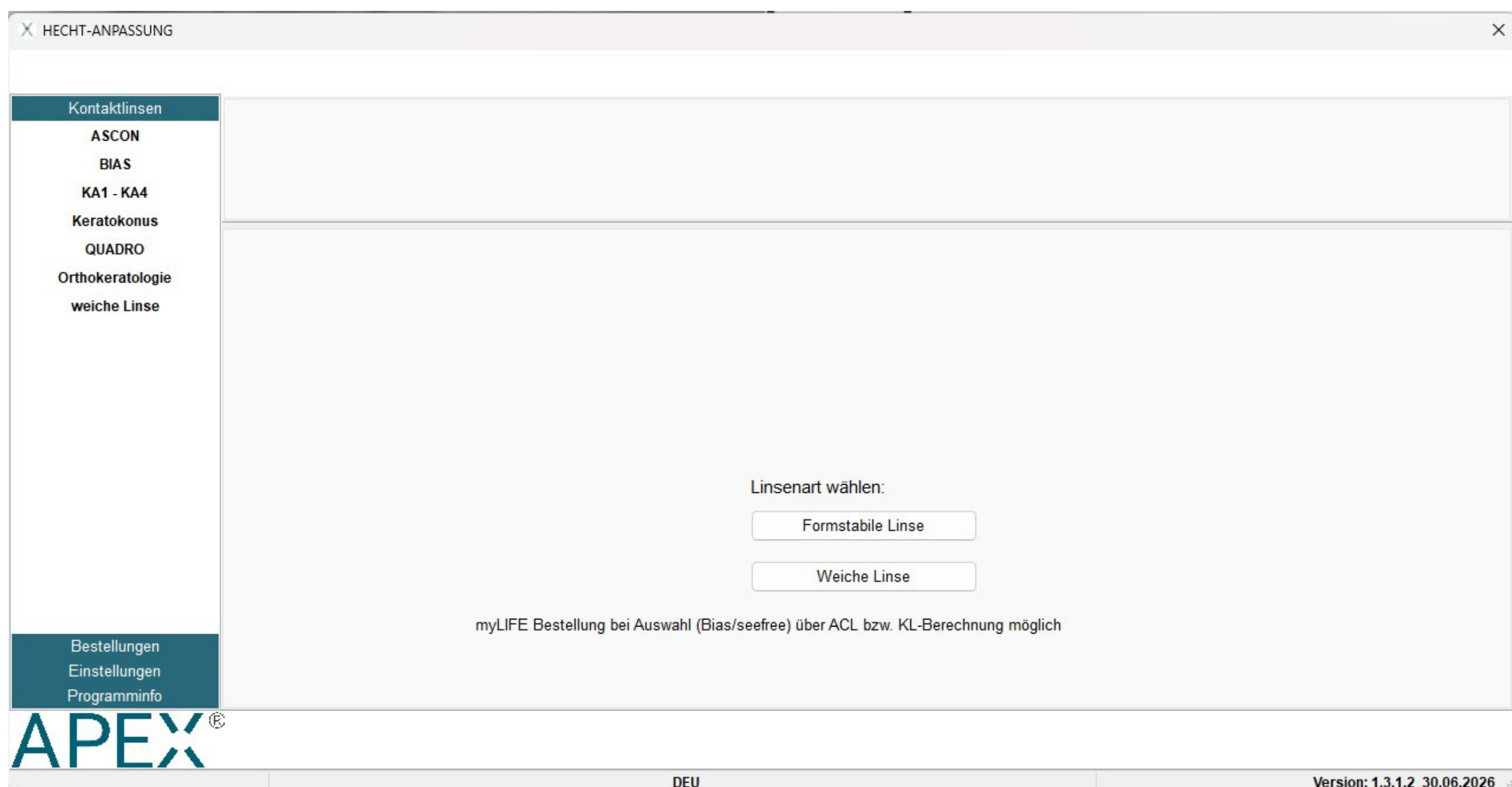

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Ihr HECHT Contactlinsen Team